


Dieser Corona Schnelltest ist **im Testcenter** für Sie **kostenfrei (Bürgerstest)**.

Der Corona-Schnelltest NASOCHECKcomfort zeichnet sich besonders durch seine einfache und sichere Anwendung aus. Ein kurzer steriler Tupfer wird lediglich 2 cm tief in beiden Nasenlöchern gerollt, in die Testkarte gesteckt und anschließend werden 6 Tropfen der Testflüssigkeit darauf gegeben. Nach nur 15 Minuten zeigt der Test über Farbstreifen ein positives oder negatives Ergebnis an.

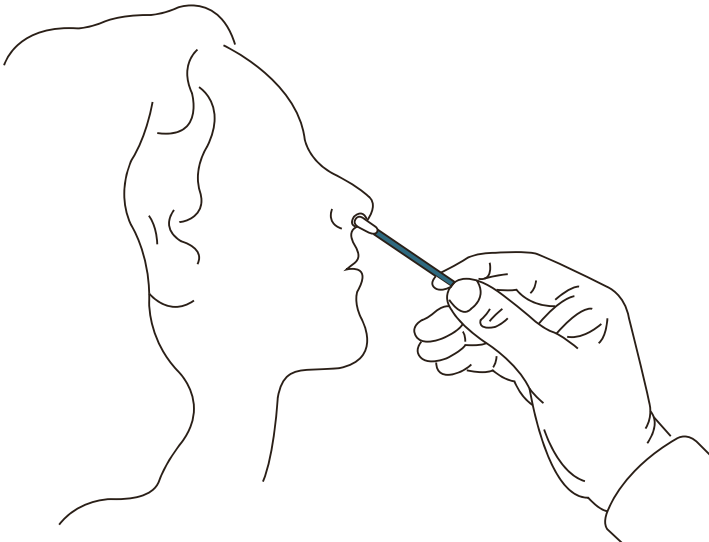

Wir Entnehmen die Probe mittels Wattestäbchen: nur 2 cm tief in jedem Nasenloch mit 5-Mal drehen

NASOCHECKcomfort

Sabine Schröter e.K.
Branterei 21
26419 Schortens


info@corona-schnelltest-oldenburg.de
aurich@corona-schnelltest-check.com
schortens@corona-schnelltest-check.com

Öffnungszeiten, Adressen der Testcenter:

www.corona-schnelltest-oldenburg.de

NASOCHECKcomfort

Dieser Test ist bald in unserem online shop erhältlich: www.blutgruppe-schnelltest.de

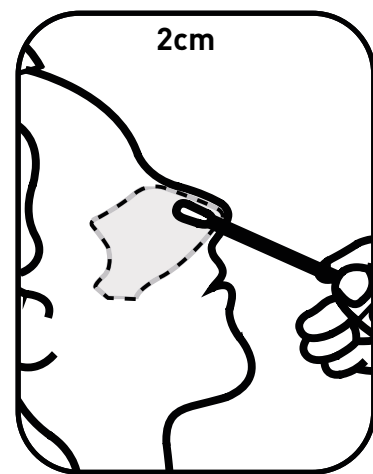

Testergebnis negativ: es liegt mit großer Wahrscheinlichkeit keine Ansteckungsgefahr vor. Mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit kann aber auch ein sogenanntes "falsch-negatives" Testergebnis vorliegen.

Testergebnis positiv: Werden Sie positiv getestet, sind Sie mit großer Wahrscheinlichkeit Coronavirus SARS-CoV-2-Vireenträger und damit gesetzlich verpflichtet, sich unverzüglich in Quarantäne zu begeben, um nicht weitere Personen anzustecken. Zur Sicherung der Diagnose muss ein PCR-Test bei Ihrem Hausarzt durchgeführt werden. Jede Covid19-Infektion muss an das Gesundheitsamt gemeldet werden.

Das Testergebnis senden wir Ihnen digital verschlüsselt per Email zu. In der zweiten Email von uns ist das Kennwort zum öffnen der Datei. Sie können das Testergebnis auch nach 20 Minuten abholen (nochmal vorgehen)



 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Evaluert und bewertet als dem Stand der Technik entsprechend

Paul-Ehrlich-Institut 

